



Porphyrins; Urine

ポルフィリン：尿検査 検体作成手順

- 始める前にこの説明書をよく理解して下さい。

尿ポルフィリン検査の検体採取は 24 時間の尿採取、或いは朝一番の尿採取であります。抗生物質薬を服用している場合は、検体採取 48 時間前まで一度中止して下さい。医師の指示が無い限り、検体採取 48 時間前、或いは検体採取中、非本質的な薬の服用はご遠慮下さい。医師に相談せずに処方薬を中止しないで下さい。

女性の患者は月経期間中に尿を採取してはいけません。

- 検査キットの中身を確認下さい：

冷凍パック	1 個
発泡スチロールケース	1 個
24 時間尿採取用容器	1 個 (朝一番の尿採取には使われません)
検体採取カップ	1 個 (検査キット箱とは別提供となります)
防腐剤の入った検体用チューブ	1 個
(注意：炎症を起こす事があるので飲み込んだりしないでください。)	
吸収性パッドとジップロック袋	1 個ずつ
尿中ポルフィリン検査申込書	1 枚
FedEx 送り状 (Air Waybill)	1 枚
FedEx UN3373 Pak	1 枚 (検体発送時のビニール製封筒です)
インボイス (CUSTOMS INVOICE)	3 枚
FedEx 検体発送方法	1 枚

- 上記について欠品がある場合はデトックスまでご連絡下さい：03-5876-4511
- キットの外箱は発送に使うので捨てないで下さい。

● 検体作成手順：

- 1) 起床した後、検体採取用コレクションカップに最初の朝の排尿を採取します。防腐剤の入った検体採取用バイアルに採取した尿を入れます。白いラベルの上部の部分まで尿を入れ、しっかりと蓋を閉めて下さい。バイアルに尿を入れ過ぎないで下さい。
- 2) 申込用紙の検体採取記録の部分（右上）に検体採取日を記入して下さい。‘First Morning Urine’ ‘朝一番の尿’と書かれた部分にマークして下さい。
- 3) 患者名、検体採取日、生年月日をバイアルに記入して下さい。検査はバイアル上の患者情報なしで実行する事は出来ません。ジップロック袋にバイアルを入れ、ジップロック袋と冷凍パックを冷凍して下さい（通常 6 時間）。
- 4) 冷凍された検体（ジップロック袋に梱包）と冷凍パックを取り出します。発泡スチロールケースに冷凍パックを置いてから、その上に検体の入ったジップロック袋を置きます。蓋を閉めて、発送用箱に入れて下さい。
- 5) 記入漏れのない様申込用紙に記入して下さい。申込用紙を発送用箱に入れて下さい。これで発送の準備は出来ました。”FedEx 検体発送方法” 用紙をご覧ください、検体を発送ください。

最善の結果のために、ラボは検体を出来るだけ早く発送する事をお勧めします。検体を同じ日に発送する事が難しい場合（週末、祝日等）は、冷凍された検体（ジップロック袋）とフリーザーブリックを発送できるまで冷凍して下さい。検体は冷凍の状態で、採取から 5 日以内にラボに到着しなければなりません。検体の採取から 5 日後に到着した検体は破棄されます。加えて、検体は光から遮断された状態にして下さい。



Detox Co.,Ltd

〒102-0085 東京都千代田区六番町5-18 六番町ステートビル103号

Tel : 03-5876-4511 Fax : 03-3222-5770 E-Mail : ino@detox.jp

<http://detox.jp>

キレーション治療の総合サポート、治療、検査などのクリニック導入のプロデュース
オーストラリア製高濃度ビタミンC製剤、食物アレルギー検査、米国のトップブランド
サプリメントなどの販売